

## Boîte de 5 AutoTest Antigénique Covid-19



### Points forts

- Boîte de 5 autotest
- Par prélèvement nasal
- Vente exclusivement aux professionnels
- Rupture

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)

## Description technique

### Boîte de 5 AutoTest Antigénique Covid-19

L'AutoTest antigénique est un test rapide de dépistage du nouveau coronavirus (SARS-Cov-2). Il s'agit d'un test de diagnostic in vitro dont le prélèvement, la lecture et l'interprétation des résultats sont réalisés par l'individu lui-même. Le kit est prêt à l'emploi et contient tout l'équipement nécessaire pour la réalisation du test.

L'autotest de dépistage du Covid-19 par prélèvement nasal rapide (Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card) a reçu l'approbation de l'ANSM pour être distribué et utilisé en auto-diagnostic par des profanes sur l'ensemble du territoire français. Pour plus d'information, nous vous invitons à consulter la liste officielle des acteurs autorisés à distribuer des tests de dépistage du Covid-19.

Les entreprises peuvent mettre à disposition de leurs salariés, si elles le souhaitent, des autotests dans le respect des règles de volontariat et de secret médical et avec une information du salarié par un professionnel de santé conformément aux dispositions fixées par le ministère de la santé (extrait du Protocole National pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19 du 18 mai 2021).

#### Qu'est-ce qu'un Auto Test antigénique ?

Le dispositif d'auto-test antigénique de dépistage de la Covid 19 est un test d'auto-diagnostic in vitro utilisant la méthode immun chromatographique rapide comme aide à l'auto-diagnostic du SARS-Cov-2. IL est destiné à être utilisé pour la détection qualitative rapide de l'antigène du nouveau coronavirus SARS-Cov-2 dans un écouvillon nasal humain. Ce test est destiné à fournir des informations qui aideront le diagnostic de la maladie infectieuse COVID-19 causé par le 2019-nCoV.

L'autotest est un test pour lequel toutes les étapes sont assumées par la personne elle-même : auto-prélèvement, réalisation et interprétation du test.

L'auto-test antigénique est un test rapide de dépistage du nouveau coronavirus. Il s'agit d'un test de diagnostic in vitro pour la détection qualitative des nouveaux antigènes du coronavirus dans un écouvillon nasal, en utilisant la méthode immunochromatographique rapide. L'identification est basée sur les anticorps monoclonaux spécifiques du nouvel antigène du coronavirus. Ces tests sont moins invasifs que les tests sur prélèvement nasopharyngé. Le prélèvement nasal ne nécessite pas d'être réalisé aussi profondément que le prélèvement nasopharyngé.

#### Tout autotest antigénique positif doit ensuite faire l'objet d'une confirmation par un test RT-PCR (nasopharyngé ou salivaire) qui permette également de caractériser le variant en présence.

Parce que les autotests sont réalisés en totale autonomie par les individus, du prélèvement à la lecture u résultat, la HAS les recommande pour des indications qui ne recouvrent pas celles des TDR et des TROD. Elle recommande l'utilisation des autotests antigéniques chez les personnes asymptomatiques de plus de 156 ans dans les deux situations suivantes :

- Indication médicale, dans le cadre d'un dépistage itératif ciblé à large échelle en alternative aux TDR/TROD antigéniques sur prélèvement nasopharyngé ou nasal. Le choix entre TROD et autotest dépend du mode d'organisation du dépistage et de la volonté et de l'aptitude de chacun à réaliser l'un ou l'autre test.
- Indication dans le cadre d'une utilisation restreinte à la sphère privée (par exemple, avant une rencontre avec des proches...). Le test devra idéalement être réalisé le jour même ou à défaut la veille de la visite.

#### Composition des auto tests rapide SARS-COV2

Les boîtes d'autotests sont composées comme suit :

- 5 tubes tampon d'extraction
- 5 écouvillons à usage unique
- 5 cassette de test
- 1 sac poubelle
- 1 boîte et une notice d'utilisation en français (que vous pouvez retrouver en seconde photo du produit)

#### Comment réaliser et interpréter l'auto-test ?

L'autotest est un test pour lequel toutes les étapes sont assumées par la personne elle-même. Le prélèvement nasal ne nécessite pas d'être réalisé aussi profondément que le prélèvement nasopharyngé. Pour autant, les tests dont la HAS recommande aujourd'hui l'utilisation sont des tests sur prélèvement nasale dit "profond", par opposition aux tests sur prélèvement nasal antérieur. Le prélèvement nasal profond se réalise à une profondeur de 3 à 4 cm, avec un écouvillon spécifique, plus épais que l'écouvillon des tests sur prélèvement nasopharyngé. Une fois introduit dans le vestibule narinaire, la personne devra lui faire faire 5 rotations avant de le retirer. Lien sur la vidéo [auto-test](#).

Interprétation :

- Résultat positif : deux bandes de couleurs apparaissent, à la fois la ligne de détection (ligne T) et la ligne de contrôle de la qualité (C).
- Résultat négatif : une bande colorée apparaît uniquement sur la ligne de contrôle de qualité (C)
- Résultat invalide : la position de la ligne de contrôle de la qualité (C) dans la fenêtre d'observation ne montre aucun rendu de couleur, indiquant que le test est invalide.

Dans le cas où l'auto-test Covid-19 montre un résultat négatif, il faut bien entendu continuer à respecter les gestes barrières. Dans de rares exceptions, il est possible que les résultats soient erronés si le test a mal été effectué.

Dans le cas où le test serait positif, il faut alors réaliser un test RT-PCR qui confirmera ou non le résultat. Il faut en outre s'isoler immédiatement et prévenir toutes les personnes qui ont été en contact avec vous. Si nous ne pouvez pas télétravailler, il faudra alors demander un arrêt de travail le temps d réaliser le test PCR.

**Attention, ces tests sont réservés exclusivement aux professionnels (toutes activités) et aux pharmaciens (pas de vente au grand public). Le numéro de SIRET ou RPPS est obligatoire (à renseigner au moment de l'inscription). Cegequip ne pourra par conséquent pas vendre ces produits à des particuliers.**

Ces **solutions de désinfection** est en stock et l'expédition se fait sous 24h-72h.

=> Découvrez également nos :

[Solution de désinfection](#)

[Spécial Covid-19](#)

[Hygiène et propreté](#)

## Caractéristiques techniques

Référence	040903011
Composition	5 Tube tampon + 5 écouvillon + 5 cassette de test + 1 sac poubelle + 1 boîte et notice d'utilisation

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)